

DIVÃ ELÉTRICO BIPARTIDO SIMPLES

REFERÊNCIAS

10.DV.1682 – 10.DV.1682.1 - 10.DV.1683 – 10.DV.1683.1 – 16.DV.1683.2

FIM A QUE SE DESTINA

Divã/marquesa elétrica bipartida, destinada a dar suporte à atividade médica – outros. Para fins de diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença, lesão ou deficiência.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

. Estrutura bipartida em tubos de aço retangulares E235 60x40x3mm; 60x30x1,5; 45x25x1,5mm; 40x20x2mm; tubos aço quadrados E220 e ST-28 40x1,5mm; 25x1,5mm, tubos redondos E220 Ø25x2mm Ø16x2mm, barras, chapas e diversos varões de aço, soldada a Mig – Tig por processo manual.

. Desengorduramento e fosfatação da superfície e pintura a epoxy.

. Leito bipartido de espuma flexível de poliuretano de 30 kg/m3 revestida a napa composta por malha de poliéster e algodão revestida a PVC. (Dimensões C x L: 1930x680mm).

. Cabeceira acionada por sistema de mola a gás, com e sem abertura facial (10.DV.1682 / 10.DV.1683), com suporte rolo papel incluído (para rolo papel até 600mm não incluído).

. Base com 4 rodas e sistema de bloqueio.

. Altura regulável por motor elétrico acionado por comando de pé (540 a 850mm) Ref.^a 10.DV.1682/3.

. Suporte para rolo de papel de 500mm incorporado na cabeceira em todas as referências.



. **10.DV.1683 e 10.DV.1683.1** sem orifício facial.

ACESSÓRIOS (Não incluídos):



. Par de Guardas Laterais pintadas para Divãs Ref.^a 10.DV.1688 ou 10.DV.1689 (inox)

DIMENSÕES:

10.DV.1682

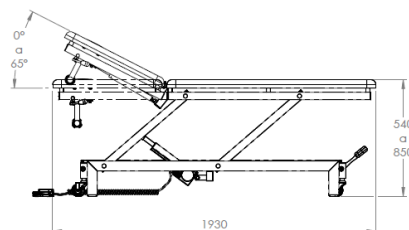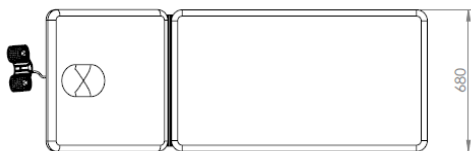

10.DV.1683

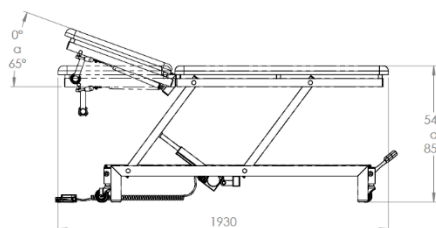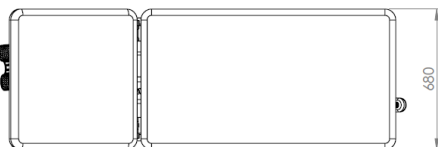

SEGURANÇA

- . Para movimentar/posicionar o paciente (assim como a sua entrada e saída do divã) é conveniente colocá-lo numa altura mais adequada para o efeito mantendo ativo o sistema de imobilização/travão das rodas, a fim de evitar desequilíbrios que coloquem em perigo o paciente ou o utilizador.
- . Não serve para transportar o paciente. Não foi concebido para massagens. Para deslocar o divã destrave as rodas. Não arraste o divã. Evite o derrame de líquidos sobre os componentes elétricos, ex: motor e comando.
- . Quando o motor for acionado deve-se ter em atenção o perigo de esmagamento nas articulações assim como na articulação da cabeça. 
- . Não deve ser usado por mais que 1 pessoa ao mesmo tempo e com peso superior a 170 kg.
- . Não aproximar fontes abrasivas ou de calor porque possui matérias passíveis de se inflamarem.
- . Antes de utilizar um produto JMS não deixe de consultar o Manual de Utilizador.

ARMAZENAMENTO/CONSERVAÇÃO

- . Os divãs são embalados em cartão e/ou filme. Devem ser armazenados em locais com temperatura e humidade controlada (temperatura abaixo dos 25°C, humidade inferior a 60%), de forma a não danificar a embalagem nem o produto.
- . O seu transporte/movimentação enquanto embalado, deve ser feito por pelo menos 2 pessoas.
- . Devem ser armazenados em locais que garantam proteção contra quedas, na posição horizontal com estofos para cima e dentro da embalagem, **não devendo ser empilhados**.
- . Nas operações de limpeza não usar detergentes, soluções com álcool nem materiais que possam danificar o produto, use apenas água morna com sabão e seque o divã ou marquês.
- . Para melhor conservação e limpeza do estofos deve consultar o Manual de Utilizador.

QUALIDADE

- . Todos os nossos produtos são concebidos a partir de matérias-primas e subsidiárias rigorosamente controladas na receção sendo incorporadas no processo de fabrico definido segundo procedimentos internos no âmbito do sistema de gestão da qualidade implementado NP EN ISO 9001.
- . Os produtos JMS possuem garantia. Consulte o Certificado de Garantia em vigor na empresa.

